

# CE

## Návod na použitie Respirátor FFP2 – CE 1463

### UPOZORNENIE

1. Pred použitím si prečítajte návod na použitie, presvedčite sa, či respirátor nie je poškodený a pri nasadzovaní respirátora na tvár postupujte podľa návodu. Nedodržanie pokynov môže výrazne znížiť účinnosť respirátora a zapríčiniť vážne poškodenie zdravia.

### NÁVOD NA POUŽITIE

1. Respirátor držte v ruke tak ako na obrázku: nosový diel uchopte končekmi prstov, aby popruhy viseli okolo zápästia.
2. Priložte respirátor na tvár pod bradu s nosným dielom nahor.
3. Horný popruh upevnite okolo hlavy, rovnako upevnite i spodný popruh pod ušami a masku nasadte.
4. Popruhy nesmú byť prekrútené.
5. Obomi rukami utesnite medzery okolo nosa, aby maska správne sedela. Utesnením iba jednou rukou môže byť znížená účinnosť respirátora.
6. Pred vstupom na pracovisko riadne skontrolujte utesnenie masky.

Respirátor je určený na jednorazové použitie, nečistí sa, čas použitia závisí od prашnej koncentrácie na pracovisku a aktivity používateľa. Respirátor vymeňte v okamihu, keď sa vám začne horšie dýchať, prípadne keď dôjde k poškodeniu respirátora.

Respirátor je určený na ochranu používateľa proti vdychovaniu pevných častíc a kvapalných aerosólov neprevyšujúci 20-násobok NPK/PEL (najvyššia prípustná koncentrácia).

Vhodný napr. pri brúsení dreva, omietky, betónu, tehál, dlaždíc...

**Skladovanie a likvidácia:** respirátor sa musí skladovať v suchom a čistom prostredí pri teplotách -20 až + 40 °C a max. relatívnej vlhkosti do 80 %. Po použití likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch, pokiaľ nie sú respirátory znečistené nebezpečnými látkami, vyhodte do komunálneho odpadu.



Tento výrobok je v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády č. 21/2003 Zb., preberajúcim smernicu Rady 89/686/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov, v znení smernice 93/68/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/58/ES. Posúdenie harmonizovaných noriem ochrany **EN149:2001+A1 2009**.

**Dovozca:** RIHACEK s.r.o., Stránského 11, 616 00 Brno, IČO: 28312252